



**PRIMEDIC**  
Saves Life. Everywhere.

## 普美康 AED 操作使用





**PRIMEDIC**

Saves Life. Everywhere.

- 发现患者，判断环境安全
- 判断患者，如果没有反应，立即呼救
- 拨打120，取来AED

**120**





**PRIMEDIC**  
Saves Life. Everywhere.

如果确认患者**无反应，无呼吸**，马上开始CPR



- 位置：胸骨下半部
- 按压深度：5-6厘米
- 按压速度：100-120次/分
- 保证胸廓充分回弹
- 30次按压：2次人工呼吸

尽早获得**AED**，一旦**AED**到达，尽快开始使用



**PRIMEDIC**  
Saves Life. Everywhere.

一旦**AED**到达，尽快开始使用 ！



## AED 第一步

开电源： 打开机盖，自动开机

听指令： 根据AED语音提示操作



PRIMEDIC

Saves Life. Everywhere.

## AED 第二步



- 去除患者上身的衣物
- 确保胸前皮肤干燥
- 如果患者胸前毛发过多，请剃除，以免影响电极片接触





**PRIMEDIC**  
Saves Life. Everywhere.

## AED 操作使用 **第三步**



- 打开电极片包装，取下防护膜
- 按照图示位置，将电极片贴上
- 注意两个电极片不要贴得过近，电极片要紧贴于皮肤上



**PRIMEDIC**

Saves Life. Everywhere.



## AED 操作使用 **第四步**

- 插上电极插头
- AED开始分析心率，发出语音提示，请勿接触患者
- AED如果判断患者需要除颤，发出语音提示，开始充电
- AED如果判断患者不需要除颤，发出语音提示，继续CPR



**PRIMEDIC**

Saves Life. Everywhere.



## AED 操作使用 **第五步**

- 如果需要除颤，充电完成后，根据AED语音提示，按下绿色按钮，进行除颤
- 除颤放电时，请不要接触患者
- 除颤放电完成后，根据语音提示，继续CPR



**PRIMEDIC**

Saves Life. Everywhere.

## AED使用注意事项


- 确认患者无意识、无呼吸（或仅有喘息）后立即启动急救生命链（CPR+AED）
- 确保现场环境安全
  - 患者躺在平坦的坚硬表面
  - 患者胸前皮肤干燥
- 开机后，按照AED的语音提示进行操作
- AED电极片为一次性耗材，拆开包装或使用后必须更换
- 如设备有任何异常状况（自检不通过、电池无电等）请尽快联系厂家



**PRIMEDIC**  
Saves Life. Everywhere.

## 数据管理与心电图分析软件

- 可取出的存储卡Compact-Flash-Card (Type II)
- 存储量: 2GB
- 超长记录时间 (可带语音录音)
- 标配心电图浏览软件
- 可回顾开机后全部操作信息
- 可浏览病人心电图

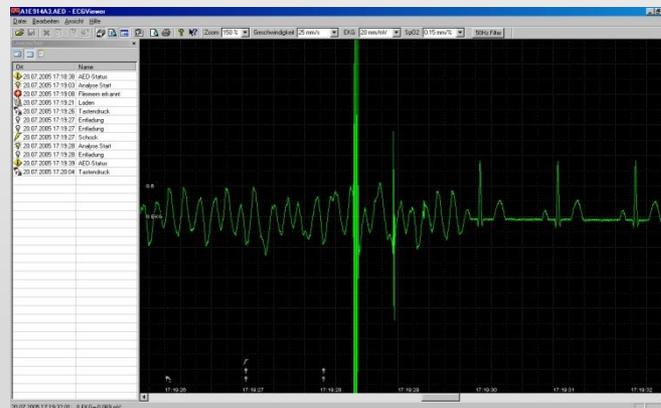



**PRIMEDIC**

Saves Life. Everywhere.

## HeartSave AED 培训机

- 专为培训设计，无高压放电
- 外观、尺寸及功能全仿真机
- 仿真电池采用5号电池
- 可预选当地语言
- 红外遥控器，可模拟各种现场操作演示





**PRIMEDIC**  
Saves Life. Everywhere.

## 联系我们

**联系人： 林标**

**电 话： 15850582114**

**地 址： 江苏省南京市秦淮区瑞金路48号**